

Bruksanvisning 670132431

Neglevifte Azzurro F18 for fotpleiestol



Produktinformasjon

Veldig praktisk neglevifte for fotpleiestoler; og monteres fast ved å ta ut nederste delen på den ene splittede fotdelen. Passer til de fleste stoler med innebygd uttrekkbar ytre, splittet bændel med strammeskrue. Viftearmen er 25x12mm, så hvis inngangen er 25mm bred eller mer, og du har skru-feste, skal viften passe til stolen -ellers kan monteringssett kjøpes i tillegg til andre modeller. Viften kombinerer høy ytelse og brukervennlig design -og sørger for at døde hudpartikler, sopp og bakterier sprer seg minimalt i luften. Stålhus som er enkelt å rengjøre, chrome sikkerhetsnett, to-lags vaskbare støvposer, og av/på bryter med hastighetsstyring

Bruk

1. Ta av den nederste, avtagbare fotdelen, og sett inn viften i stedet. Viftearmen er 25x12mm, så hvis inngangen er 25mm bred eller mer, og du har skru-feste, skal viften passe til stolen.
2. Sett på støvposen undersiden av viften, og sørg for at strikket på posen sitter godt/tett
3. Pass på at ledningen er hel og uskadet, og plugg i kontakten
4. Skru så på viften med av/på kanppen på siden -og den er klar til bruk
5. Skru viften av når den ikke er i bruk
6. Dersom du ikke har avtagbar del, eller dimensjonen er feil -kan du kjøpe monteringssett som passer de fleste modeller

Vedlikehold

Husk alltid å bytte pose så fort den begynner å bli full. Dersom viften brukes med full pose, kan dette påvirke på effekten, og forårsake skade/feil på enheten. NB! Viften må ikke skrues opp eller demonteres på noen måte for dette. Ellers bør selve viften rengjøres regelmessig, for å forhindre oppsamling av støv og smuss -som kan ende opp med at enheten ikke virker som den skal, eller forårsaker skade.

Teknisk informasjon

Spennning: 220V/240V
Effekt: 38W
Nominell frekvens: 50/60Hz
Kapasitet: 345/406m³ /t
Turbinhastighet: 2800/3200 RPM
Støynivå: 51/58 dB



Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)
Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.
Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid
Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.
Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)



EF-samsvarserklæring

Dette produktet oppfyller følgende krav:

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC



Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

Importør

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55