

670148174 NORSK BRUKSANVISNING

Slipemaskin Saeyang Marathon Cyclone



Saeyang Marathon Cyclone-Vac absorberer en spesialisert enhet som lar deg opprettholde høye hygienestandarder, og effektivt beskytte helsen til personer som utfører tjenester på klienter. Den profesjonelle slipemaskinen er designet for pedikyr-/og fotterapi, spesielt tørre behandlingsprosedyrer, men den vil også fungere godt under manikyr. Det effektive håndstykket med absorbenten og den intuitive betjeningen forbedrer fotterapeutens arbeid betydelig, noe som letter utførelsen av et bredt spekter av behandlinger.

LCD-display

Oversiktlig kontrollpanel med LCD-display, og intuitiv betjening garanterer høy brukskomfort. Du kan enkelt justere sugekraften til absorberer under drift eller slå den helt av. Rotasjonshastigheten til hodet reguleres av en knapp, og ved å trykke på den kan du starte eller sette utstyret i dvale. I tillegg lar enheten deg programmere opptil 3 egne driftsmoduser; Alle parametere lagres da - hastighet og rotasjonsretning, nivå på absorpsjonskraft - og kan når som helst hentes frem med en enkelt knapp. Det klare displayet lar deg observere de gjeldende innstillingene til enheten - hastighet og rotasjonsretning, nivået av absorpsjonskraft. I tillegg, etter å ha valgt en av dine egne driftsmoduser, vises symbolet for det aktiverte programmet på skjermen. Det tilsvarende ikonet vil også lyse når filterposen må skiftes.

Håndstykke

Et stillestående, ergonomisk håndstykke med en børsteløs motor, og justerbar hastighet i området 4 000 - 40 000 RPM med en effektiv absorber, garanterer utmerket kvalitet på tjenester og opprettholder de høyeste hygienestandardene. Støv fra behandlingsstedet suges gjennom hullene i hodet direkte til filteret. PÅ/AV-bryteren plassert på baksiden av håndtaket lar deg enkelt stoppe rotasjonen og suget midlertidig under drift. Dette letter fri drift av enheten. Utskifting av kuttere er enkelt, noe som sikres av Push-in & Pull-out-mekanismen - bare skyv kutteren inn i hylsen, uten å måtte skru eller blokkere - og det forenkles i tillegg av verktøyet som følger med settet. Håndstykket kan enkelt demonteres for enkel rengjøring.

Effektiv absorber

Riktig lungebeskyttelse er nøkkelen til ansvarlig og trygt arbeid for en fotterapeut og opprettholde høye hygienestandarder på kontoret. Den høye sugekraften til enheten gjør at den perfekt absorberer støv som genereres under behandlingene. Det er også mulig å justere absorpsjonen på fem nivåer og om nødvendig deaktivere denne funksjonen.

Utskiftbare poser

Settet inkluderer 5 dedikerte effektive filterposer. De sikrer sikker og langsiktig drift av enheten, og fanger opp og holder på støv og eventuelle partikler av materiale som frigjøres under podologiske behandlinger. Når posen må byttes, vises det aktuelle ikonet på enhetens skjerm.

Tilbehør

Settet inkluderer også et sett med kuttere/bor som gjør at du komfortabelt kan utføre ulike pedikyrbehandlinger og ett verktøy av et spesielt materiale, som gjør det enkelt å rengjøre. Ulike former, materialer og graderinger av kuttere lar deg velge riktig verktøy for tjenesten som utføres for øyeblikket og stedet det jobbes med. De medfølgende verktøyene for rengjøring av hodet og demontering av kuttere sikrer enkelt vedlikehold av enheten i god stand, noe som gjør den enklere å bruke.

Teknisk informasjon

Spennning: 100-240V
Effekt: 100W (Maks)
Nominell frekvens: 50/60Hz
Hastighet: 4 000-40 000rpm
Enehtsvolum: 57.4 B-63.1
Vekt Håndstykke: 364g
Sikring: 3.15A 250V

Bruksanvisning


1. Sett i ny pose. Trekk ut lokket, og fest posen på enden av slangen -og sett lokket inn igjen. Pass på at posen ikke brettes eller klemmes
2. Sett i strømkabel i uttaket bak, og plugg den i egnet stikkontakt.
3. Sett i ønsket bit i håndstykket, og sjekk produsentens anvisning for bruk og hastighet.
4. Sjekk at alt er koblet riktig, og sitter som det skal -før du da trykker på av/på knappen på baksiden av kontrollenheten til «ON»
5. Nå kan du sette ønsket rotasjonsretning, rotasjonshastighet, og sugekraft. Sjekk alltid hva som er min/maks i forhold til arbeidet du skal bruke på rotasjonshastighet.

Dersom du skal bruke fotkontrollen (valgfritt), kobler du denne til baksiden i tilkoblingen (1). Denne gir deg frihet, og forenkler arbeidet, og slås av og på med start/stopp knappen.

Merk: Når sugefunksjonen brukes i minst 10 timer, vises ikonet for bytte av støvpose. - Etter at du har skiftet ut støvposen, trykk på suge av/på-knappen i 2 sekunder for å slette ikonet for bytte av støvpose.

Funksjoner kontrollenhet front


1. Støvsuger av/på
2. Start/Stop
3. Redusere av sugekraft
4. Støvposelokk
5. Avsug-/og håndstykke-kabel
6. Pauseknapp
7. Håndstykke
8. Rotasjonshastighet
9. Rotasjonsretning
10. Hukommelsesknapp
11. LCD-display
12. Økning av sugekraft

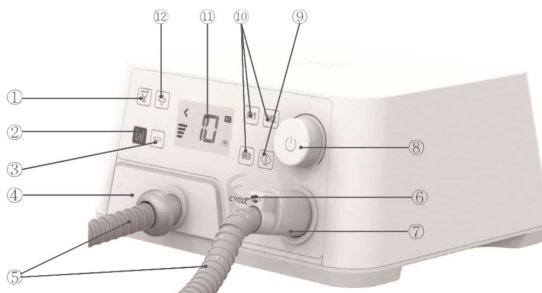

Funksjoner kontrollenhet bakside



1. Tilkobling fotkontroll
2. Strøm av/på
3. Strømtilførsel

NB! Sikring ligger bak lokket mellom strømtilførsel og av/på knapp.

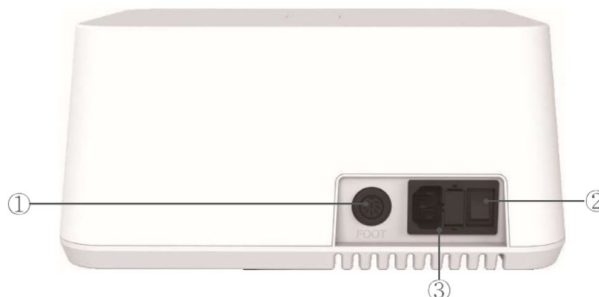

Funksjoner kontrollenhet display

1. Visning av rotasjonsretning
2. Nivå på sugekraft
3. Rotasjonshastighet (rpm)
4. Indikator for støvpose
5. Hukommelse

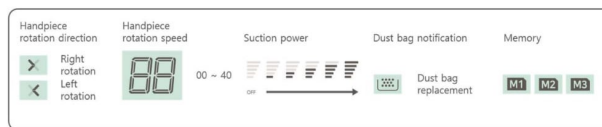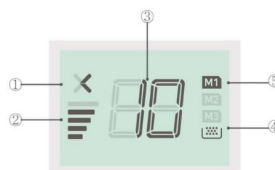

Feilmeldinger

Feilkode E1: Problem med tilkoblingen av håndstykke

Løsning: Koble fra slangen som går inn i maskinen, og koble den til igjen.

Feilkode E2: Problem med tilkoblingen av fotkontroll

Løsning: Koble fra kabelen som går inn i maskinen, og koble den til igjen.

Feilkode E3: Overoppheting/overbruk/for hardt press på håndstykket

Løsning: Slå av apparatet, og la det hvile noen minutter, sjekk at det ikke er kommet inn støv/smuss eller annet i chooksen (der bitsen settes inn), og så slå det på igjen.

Feilkode E4: Overoppheting/tetting av støvsuger.

Løsning: Slå av apparatet, sjekk støvposen, og bytt hvis nødvendig. La den hvile ett par minutter, og slå på.

Dersom ikke den aktuelle løsningen hjelper, ta kontakt med forhandler.

Advarsler

Slipemaskiner kan oppnå høye omdreininger og skarpe verktøy; så vær ekstra oppmerksom på dette ved bruk.

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)

Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.

Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for professionelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)



Vedlikehold

Maskinen bør holdes fri for støv og smuss, og jevnlig åpne-/og lukke twist-locken. Husk å aldri bruke eller starte maskinen uten bits/bor eller låsbeskytter -da dette kan skade håndstykket.

Rengjøring av håndstykke

Ta av ut bitsen hvis, og ta av dekslet til håndstykket.

Børst forsiktig over alle deler med en myk børste, og ta så på dekslet igjen.

Bruk rengjøringsbørsten til å gjerne eventuelle

rester av støv i chooksen (der bitsen settes i).

HUSK at du aldri må sette på maskinen uten å ha i bits eller låsepinne, da dette kan skade håndstykket.



LAGRING OG TRANSPORT

Enheten skal kun transporteres ved temperaturer i området (-) 20 °C til (+) 50 °C i originalemballasjen. Oppbevar enheten på et godt ventilert sted med en relativ fuktighet på ikke mer enn 75 %. Driftstemperatur fra (+) 10 °C til (+) 40 °C. Under lagrings- og transportprosesser må enheten ikke kastes eller slippes, utsettes for mekaniske støt eller atmosfæriske stoffer.

**Resirkulering**

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

**Dette produktet oppfyller følgende krav**

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC

Importer

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55