

851005673 NORSK BRUKSANVISNING

Ultrasonisk Skinn-skrubber F311B



Mange faktorer kan føre til tette porer og matt hud; inkludert sminke, miljøforurensning og overflødig olje (talg). Disse faktorene kan føre til ulike hudproblemer som akne eller hudirritasjon, etc. Ultrasonisk skinn-skrubber bruker ultralydteknologi for å skånsomt eksfoliere huden av døde hudceller og urenheter. Ultralydbølger hjelper til med å løse og fjerne olje, smuss og celleavfall fra porene - for å oppnå en merkbart strålende, sunn glød. På sitt mest grunnleggende bruker en ultrasonisk hudskrubber lydølger for å løse opp talg, døde hudceller og urenheter fra porene. Dette gjør at metallspaden med høyfrekvente vibrasjoner kan løse og trekke overflødig disse urenheterne raskt og enkelt ut fra huden; denne celle-til-celle-transformasjonen er det "skrubbede" elementet i denne estetiske hudskrubberen.

Fordeler med behandlingen

Porerensing: Høyfrekvente vibrasjoner (lydbølger) åpner effektivt opp tilstoppede porer for å fjerne skitt og skitt.

Eksfoliering: Vibrasjonene fra en ultrasonisk hudskrubber hjelper til med å løse døde hudceller, slik at de kan fjernes raskere og eksfolieres.

Komedonutvinning: Komedoner er hudormer som også ekstraheres under prosessen.

Produkt-mottak Når du mottar apparatet er det viktig å sjekke at alle deler og eventuelt ekstrautstyr er med i sendingen. Eventuelle mangler eller skader må meldes inn til oss senest 14 dager etter mottak.

Teknisk informasjon

Spenning: 100-240V
Frekvens: 50Hz/60Hz
Effekt: 10W

Bruksanvisning

Sett inn spatelen og den antistatiske håndleddsstroppen i den tilsvarende kontakten på Beauty Equipment. Når utstyret er riktig koblet til strømkabelen, vises "Strømbryteren" i rødt. Trykk på "Power Switch" for å gå inn i arbeidsmodus, og det vil vises i hvitt på skjermen. Utstyret går som standard til status for kontinuerlig bølgeutgang; dermed er energitgangen for nivå 1 satt til 15 minutter.

Ulike moduser kan velges basert på ditt behov, trykk på "Modusbryter" for å velge riktig utgangsmodus som er kontinuerlig bølge, intermitterende bølge og blandet bølge. Trykk på "Tid øke/reducere-knappen" som lar deg stille inn arbeidstiden fra 1-30 minutter.


Bruk den antistatiske håndleddsremmen for kundene dine før du trykker på "Start"/"Pause"-knappen for å starte operasjonen. Kraftenerginivået er justerbart og gjør det mulig å stille inn fra nivå 1 til 10.

Hvis den antistatiske håndleddsremmen fjernes under operasjonen, vil utstyret slutte å fungere automatisk.


Når du vil at utstyret skal slutte å virke under operasjonen kan du trykke på "Pause"-knappen.

Trykk på "strømbryteren" for å slå av utstyret når behandlingen avsluttes, og "strømbryteren" vil vise rødt på dette tidspunktet. Rengjør spatelen og den antistatiske håndleddsstroppen med 75 % alkohol etter at du har tatt ut støpselet, og oppbevar på et tørt sted.

Normal behandlingstid ved normal hudtype er 15 minutter

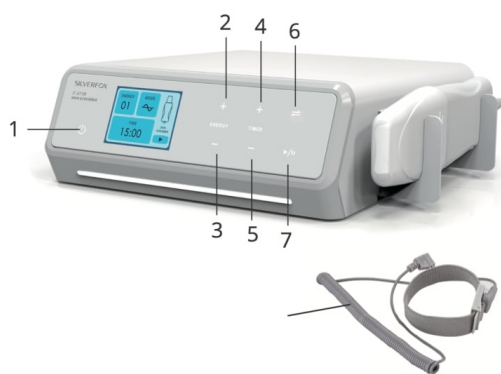

1. Av/på
2. Energi +
3. Energi -
4. Tid +
5. Tid -
6. Programvelger
7. Start/pause

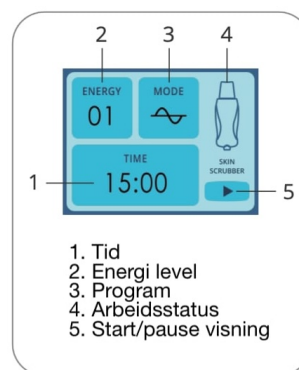

ADVARSEL under bruk:

Ikke berør utgangsgrensesnittet til Skin Scrubber alene når verten er slått på.

Ikke sett skrubberen direkte i kontakt med øyet.

Ikke bruk maskinen på: Allergiske pasienter, Brannskader, solbrenthet, betennelse eller andre sår. Som hjertesykdom, infeksjonssykdommer, nevrotiske pasienter og pasienter med metall i kroppen under behandling.

Ikke plasser spadehodet til arbeidsskrubberen i en del av huden for å unngå skade på huden.

Når du bruker skrubberen, vær oppmerksom på styrken og vinkelen på skrubberen og huden.

Når du arbeider, vær oppmerksom på forbindelsen mellom tilbehøret og verten.

Vær varsom når du bruker den, slik at tilkoblingsledningen ikke faller av.

Når du arbeider, pass på at du ikke spruter med vann eller andre etsende væsker.

Ikke bruk rustfritt stål overflaten har blitt deformert defekt spatel, for ikke å miste hud.

Hvis det er en unormal situasjon, avbryt behandlingen.

Hold skrubberen ren til enhver tid og desinfiser den med 75 % alkohol etter hver bruk.

Oppholdstiden for ett hudområde bør ikke overstige 5 sekunder.

Advarsler

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)



Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.

Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)

Skal IKKE brukes på personer med pacemaker, arytm, eplepsi, gravide, eller personer med mage/-lever/-eller nyreproblemer. Er du i tvil: kontakt pasientens lege for bruk.



Vedlikehold

Husk å koble fra strømmen før vedlikeholdet starter. NB! Apparatet må ikke skrues opp eller demonteres på noen måte for vedlikehold. Tørk av alle overflater på maskinen med en tørr klut. Metall-spatelen kan rengjøres med egent middel, og desinfiseres



Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.



Dette produktet oppfyller følgende krav

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC

Importør

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55