

851005674 NORSK BRUKSANVISNING

Ultralyd hudpleie-apparat F312B



Under en ultralyd ansiktsbehandling brukes høynivå lydbølgeteknologi for å trenge dypt inn under overflaten av huden. Denne ansiktsterapien fremmer cellulær fornyelse og reparasjon, toner ansiktsmuskler, øker blodsirkulasjonen, oppmuntrer til lymfedrenasje, bekjemper hevelser, og forbedrer hudpleieproduktets penetrasjon. Hemmeligheten bak suksessen er at med påføringen kan både vannløselige og fettløselige aktive stoffer lett trenge gjennom huden. Denne behandlingen øker også de metabolske prosessene i hudens intensitet; nærings- og oksygentilførselen til cellene. Den positive effekten på bindevevets fibre, gjør at huden blir strammere og mer elastisk. Denne terapien kan gjøres alene eller kombinert med en dypprensende behandling.

Fordeler med behandlingen

Økt permeabilitet av celledmembranen, noe som resulterer i bedre penetrasjon av hudpleieprodukt inn i de dypere lagene av huden
Økt mikrosirkulasjon og cellemetabolisme
Økt lymfestrøm på grunn av den mekaniske effekten
PH-normalisering
Linjer, akne og arr reduseres

Produkt-mottak Når du mottar apparatet er det viktig å sjekke at alle deler og eventuelt ekstrautstyr er med i sendingen. Eventuelle mangler eller skader må meldes inn til oss senest 14 dager etter mottak.

Teknisk informasjon

Spenning: 100-240V
Effekt: 11W
Arbeids effekt: 0-3W/cm³
Arbeids frekvens: 1MHz

Bruksanvisning

Sett ultralydsonden inn i den tilsvarende kontakten på utstyret. Når utstyret er koblet til strømkabelen på riktig måte, vises "Strømbryteren" i rødt. Trykk på "Power Switch" for å gå inn i arbeidsmodus, og det vil vises i hvitt på skjermen. Utstyret går som standard til tilstanden for øyesondeutgang; dermed er energitgangen for nivå 1 satt til 15 minutter.

Ulike moduser kan velges basert på ditt behov, trykk "Modusbryter" for å velge riktig utgangsmodus som er positiv utgang, negativ utgang og blandet utgangsmodus.

Trykk på "Tid øke/reduere-knappen" som lar deg stille inn arbeidstiden fra 1-30 minutter.


Trykk på "Start"/"Pause"-knappen for å starte operasjonen. Strømenegnivået er justerbart som gjør det mulig å stille inn fra nivå 1 til 10.

Når du vil at ultralydsonden skal slutte å virke under operasjonen, kan du trykke på "Pause"-knappen.


Trykk på "strømbryteren" for å slå av utstyret når operasjonen er avsluttet, og "strømbryteren" vil vise rødt på dette tidspunktet.

Rengjør ultralydsonden med 75 % alkohol etter at du har trukket ut støpselet, og oppbevar den på et tørt sted.

Behandlingstid for normal hudtype, 15 minutter

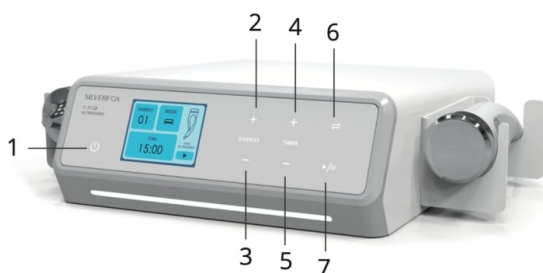

1. Av/på
2. Energi +
3. Energi -
4. Tid +
5. Tid -
6. Programvelger
7. Start/pause

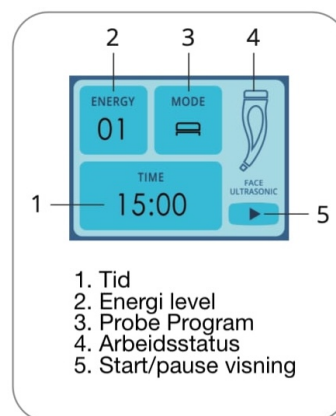

1. Tid
2. Energi level
3. Probe Program
4. Arbeidsstatus
5. Start/pause visning

ADVARSEL under bruk:

Ikke pek sonden direkte mot øyet eller masser det øvre øyelokket.

Ikke bruk maskinen på: Gravide kvinner og de som er utstyrt med et hjertekronometer; Tumorpasienter og alvorlig hjertesykdom, brannskader, skålding, solbrenthet, betennelse eller andre sår, allergipasienter og personer med kontaktesem.

Det er forbudt å åpne sonden uten kosmetisk operasjon for å forhindre fare for høy temperatur skålding og redusere levetiden til sonden på grunn av overoppheting.

Ikke fjern sonden og håndtaket i rustfritt stål selv. Hvis du snur sonden og håndtaket i rustfritt stål, kan sonden bli skadet. Denne funksjonen skal ikke brukes til annet enn kosmetiske formål.

For stell er det nødvendig å påføre nok krem eller essens på pleiedelen for å sikre at det er et godt medium mellom sonden og huden, for ikke å trekke for mye i huden. Ved bruk bør sonden være nær huden for å forhindre kavitasjon og skade på huden. Når den brukes, skal sonden ikke være i utgangstilstand uten drift, i tilfelle skade på sonden eller redusere levetiden til sonden.

Hvis sonden er for varm vil den brenne huden, så brukstiden bør ikke overstige 15 minutter, sensitiv hud bør redusere brukstiden og energiintensiteten. Å forlenge brukstiden vil ikke øke pleieeffekten og kan føre til fare. Oppmerksomhet bør rettes mot pleie av en hudoppholdstid bør ikke overstige 5 sekunder.

Etter amming, vil huden vises en kort feber rødmosset fenomen, på grunn av vibrasjon av sonden og varmeproduksjon, øker blodsirkulasjonen, som hører til normal tilstand.

Advarsler

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)



Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.

Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for professionelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)

Skal IKKE brukes på personer med pacemaker, arytmie, epilepsi, gravide, eller personer med mage/-lever/-eller nyreproblemer. Er du i tvil: kontakt pasientens lege for bruk.



Vedlikehold

Husk å koble fra strømmen før vedlikeholdet starter. NB! Apparatet må ikke skrues opp eller demonteres på noen måte for vedlikehold. Tørk av alle overflater på maskinen med en tørr klut. Sonden kan vaskes med egnet middel, og desinfiseres.



Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.



Dette produktet oppfyller følgende krav

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC

Importør

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55