

851005675 NORSK BRUKSANVISNING

Høyfrekvens hudpleie-apparat F314B



Høyfrekvens hudpleie-apparat er en populær hudpleieteknikk som brukes til å behandle en rekke tilstander, inkludert aknebehandling, forstørrede porer, fine linjer og rynker, og hovne eller mørke øyne. Høyfrekvente ansiktsmaskiner fungerer ved å bruke en høyfrekvent glasselektrode for å behandle ulike konturer av ansiktet og kroppen. Når den påføres overflaten av huden, passerer en mild elektrisk strøm gjennom den neon- eller argongassfylte glasselektroden, noe som får den til å avgi en subtil glød og summende støy. Avhengig av den inerte gassen de er fylt med, produserer elektrodene enten et neonrødt/oransje eller fiolett/blått lys. Tradisjonelt behandles akneutsatt hud med fiolett og aldrende hud behandles med rødt, men nyere studier viser at begge er effektive uavhengig av hudpleieproblemet. Under høyfrekvent behandling produseres det berikede oksygenmolekyler som skaper en antibakteriell virkning og en "naturlig" termisk vevsoppvarming. Denne reaksjonen hjelper blodårene dine med å skyve bort giftstoffer, mens cellene i huden din er beriket med næringsstoffer og fuktighetsgivende volum. Dette skaper igjen en økning i blodsirkulasjonen og cellefornyelsen som støtter økte nivåer av kollagen og elastin. Huden føles umiddelbart energisk og merkbart mykere etter bare én behandling. Høy frekvens har vist seg å være effektiv på nesten alle hudlesjoner fra akne og brannskader, til voksing og forkjølelsessår. Høyfrekvente ansiktsbehandlinger anses å være en trygg, skånsom og terapeutisk tilnærming til hudforyngelse, som raskt helbreder og gjenoppretter hudens helse.

Fordeler med behandlingen

Øker oksygen til huden, forbedrer den generelle teksturen, tonen og gløden og hjelper til med å behandle akneproblemer
Fremmer kollagenstimulering og elastinproduksjon
Oscillasjonen som produseres av høyfrekvente hjelpemidler i lymfedrenasjen, hjelper til med å spre overflødig væske jevnt.
Stimulerer sirkulasjonen og hjelper til med avgiftning
Trekker sammen blodårene og minimerer rød betent hud

Produkt-mottak Når du mottar apparatet er det viktig å sjekke at alle deler og eventuelt ekstrautstyr er med i sendingen. Eventuelle mangler eller skader må meldes inn til oss senest 14 dager etter mottak.

Teknisk informasjon

Spenning: 100-240V
Effekt: 15W
Arbeids effekt: 15W
Arbeids frekvens: 250 kHz

Bruksanvisning

Sett høyfrekvensen inn i den tilsvarende kontakten på utstyret. Når utstyret er koblet til strømkabelen på riktig måte, vises "Strømbryteren" i rødt. Trykk på "Power Switch" for å gå inn i arbeidsmodus, og det vil vises hvitt på skjermen. Utstyret går som standard til status for kontinuerlig bølgeutgang; dermed er energiutgangen for nivå 1 satt til 15 minutter.

Det er forskjellige moduser som kan velges basert på ditt behov, velg riktig elektroterapi for å installere på håndtaket til høyfrekvent elektroterapi.

Trykk på "Tid øke/reducere-knappen" som lar deg stille inn arbeidstiden fra 1-30 minutter.

Trykk på "Start"/"Pause"-knappen for å starte operasjonen. Kraftenerginivået er justerbart som gjør det mulig å være satt fra nivå 1 til 10.

Når du vil at ultralydsonden skal slutte å virke under operasjonen, kan du trykke på "Pause"-knappen.


Trykk på "strømbryteren" for å slå av utstyret når behandlingen er avsluttet, og "strømbryteren" vil vises rød på denne tiden. Rengjør elektroterapiet med 75 % alkohol etter at du har tatt ut støpselet, og oppbevar det på et tørt sted.

Anbefalt tid for oljete hudtype: 10-15 min

Anbefalt tid for tørr hudtype: 3-5 min



1. Av/på
2. Energi +
3. Energi -
4. Tid +
5. Tid -
6. Start/pause

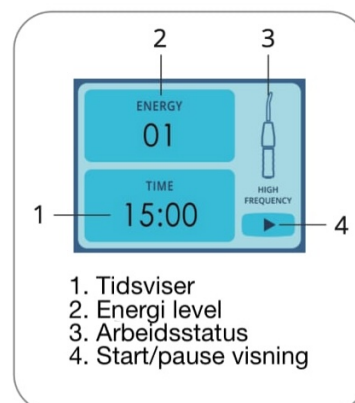

ADVARSEL under bruk:

Det er forbudt å berøre utgangsgrensesnittet til hovedmaskinen til det høyfrekvente elektroterapi-skjønnhetsinstrumentet eller utgangsgrensesnittet til håndtaket til høyfrekvent elektroterapi når hovedmaskinen er slått på.

Ikke rett røret direkte eller i kontakt med øyeområdet.

Ikke bruk maskinen på: Gravide kvinner og de som er utstyrt med justeringsanordninger (f.eks. hjertejusteringer), personer med karsykdommer og høy hudfølsomhet, personer med metallimplantater eller metallproteser innebygd i kroppen, personer med hudsår og andre tilstander.

Ikke bruk hudkremer som inneholder alkohol, da alkohol er svært brannfarlig.

Hvis alkoholbasert toner er nødvendig, bruk den kun etter bruk av dette produktet.

Ikke ta tak i krysset mellom høyfrekvenshåndtaket og elektroderøret for hånd under drift for å unngå å bli sjokkert.

Hudretensjonstiden for hver del bør ikke overstige 5 sekunder. Denne funksjonen skal ikke brukes til annet enn kosmetiske formål.

Før bruk, sjekk om elektroderøret eller metallhodet på røret er løst og om elektroderøret sprekker eller er skadet. I så fall, ikke bruk den og skift ut elektroderøret umiddelbart.

Reduser strømintensiteten til null gradvis, slå av strømbryteren og trekk ut strømledningen før du setter inn eller trekker ut elektroterapislangen.

Når du setter inn eller trekker ut elektroderøret, bruk først gummihandsker og hold elektroderøret med tommel og pekefinger: for røret inn i bunnen av hullet til det er fast, og ikke skyv røret med håndflaten for å hindre glasset fra å bryte og forårsake skader; Det er forbudt å trekke kraftig ut for å forhindre at metallhodet på elektroderøret faller av eller brykker, noe som kan forårsake skade. MÅ bruke gummihandsker, og hold med tommel og pekefinger, sett deretter inn elektroderøret til det sitter fast.

Når den er i bruk, vil høyspenningsstrømmen fra elektroterapiøret forårsake interferens. Det er forbudt å nærme seg vertsmaskinen og andre elektriske apparater til det høyfrekvente elektroterapi-skjønnhetsinstrumentet. Hvis det forstyrrer verten, kan det føre til at verten ikke fungerer eller sprekker.

Når elektroderøret er mindre enn 2,5 cm fra huden, men ikke i kontakt med huden, bør strømintensiteten reduseres umiddelbart hvis det avgir gnister som irriterer huden.

Hvis kunden fortsatt kjenner gnisten etter operasjonen ovenfor, legges et lite stykke tørt bomullshåndkle (nylon eller andre syntetiske fiberhåndklær er ikke tillatt) på kundens ansikt.

Ved bruk, hold alltid elektroderøret på kundens hud. Høyfrekvent indirekte pleie: når du slår på og av instrumentet, må en hånd alltid være i kontakt med kundens hud, aldri forlate kundens hud. Begge sider føler strømmen og det forårsaker ubehag.

Slå av strømmen før du trekker ut strømledningen etter bruk, og trekk ut elektroterapiøret for høyfrekvente elektroterapihåndtaket, steriliser og hold det tørt før du legger det i tilbehørsboksen.



Bruk gummihandsker, hold elektroden godt, og sett den inn forsiktig



Ikke dytt i enden av elektroden, og ikke bruk makt for å få den inn

Advarsler

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)

Unngå all kontakt med flytende væske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.

Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)

Skal IKKE brukes på personer med pacemaker, arytmi, eplepsi, gravide, eller personer med mage-/lever/-eller nyreproblemer. Er du i tvil: kontakt pasientens lege før bruk.



Vedlikehold

Husk å koble fra strømmen før vedlikeholdet starter. NB! Apparatet må ikke skrues opp eller demoneres på noen måte for vedlikehold. Tork av alle overflater på maskinen med en tørr klut. Elektroder kan vaskes med egnet middel, og desinfiseres.



Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.



Dette produktet oppfyller følgende krav

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC

Importer

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55