

# 851005676 NORSK BRUKSANVISNING

## Diamantsliper for mikrodermabrasjon F319B



Microdermabrasjon er en invasiv prosedyre som brukes til å fornye den generelle hudtonen og tekstur. Det kan bidra til å forbedre utseendet til hud som er påvirket av solesponering, rynker, akne og andre forhold. Mikrodermabrasjon innebærer å forsiktig slippe bort det tykke ytre laget av huden ved hjelp av en spesiell applikator med en slipende overflate - dette bidrar til å fornye huden.

Behandlingen regnes som en trygg prosedyre for de fleste hudtyper og hudtoner. Folk kan velge å få prosedyren hvis de har hudproblemer, for eksempel fine linjer og rynker, hyperpigmentering, aldersflekker og brune flekker, forstørrede porer og hudormer, akne og akne arr, strekkmerker, falmet hudfarge, ujevn hudtone og tekstur, melasma, og solskader. Behandlingen er en ikke-kirurgisk prosedyre, men selv om det er veldig lite du trenger å gjøre for å forberede deg på det, kan det være nyttig å diskutere følgende med legen: hva dine hudproblemer er for å finne ut om mikrodermabrasjon passer for deg, eller om du har medisinske tilstander som tilsier ekstra oppmerksomhet og varsomhet.

### Om behandlingen

#### Før behandling:

Det er anbefalt å unngå solesponering, solkremer og voksing i omtrent en uke før behandling, og slutte å bruke eksfolierende kremer og masker noen dager før. Det er viktig å fjerne eventuell sminke og rense ansiktet før prosedyren starter.

#### Under behandling:

Behandleren bruker et håndstykke med diamantspiss, designet for å skånsomt eksfoliere døde celler i huden din - samtidig som vil det suge dem av umiddelbart. Dybden av slitasjen kan påvirkes av trykket som påføres håndstykket, samt hvor lenge suget får være på huden. Denne typen mikrodermabrasjonsapplikatorer brukes vanligvis i mer sensitive ansiktsområder, som nær øynene.

#### Etter behandling:

Unngå å bruke aktuelle aknemedisiner i minst 2 dager etter behandling, bruk milde hudpleieprodukter, hold huden dehydrert, og beskytt huden din med solkrem, da soifølsomhet for solen i løpet av de få ukene etter behandlingen. Du kan vanligvis forvente å se merkbare resultater umiddelbart etter prosedyren. Antall mikrodermabrasjonsøkter som trengs, vil avhenge av alvorlighetsgraden av dine hudproblemer, så vel som dine forventninger.

#### Bivirkninger av mikrodermabrasjon:

Vanlige bivirkninger av mikrodermabrasjon inkluderer mild ømhet, hevelse og rødhet. Disse forsvinner vanligvis innen få timer etter behandling. Mindre blåmerker kan også forekomme. Dette er hovedsakelig forårsaket av sugeprosessen under behandlingen.

**Produkt-mottak** Når du mottar apparatet er det viktig å sjekke at alle deler og eventuelt ekstrautstyr er med i sendingen. Eventuelle mangler eller skader må meldes inn til oss senest 14 dager etter mottak.

### Teknisk informasjon

Spenning: 100-240V

Effekt: 30W

Arbeidseffekt: 30W

Arbeids frekvens: -0.07 MPa

### Bruksanvisning

1. Sett håndstykket eller -stikken inn i verts-kontakten. Når utstyret er koblet til strømkabelen på riktig måte, vises "Strømbryteren" i rødt. Trykk på "Power Switch" for å gå inn i arbeidsmodus, og det vil vises i hvitt på skjermen. Utstyrets standardinnstilling er nivå 1 i 15 minutter.


2. Velg passende mikrokrystallinsk slipehode for stedet og effekten av pleie.

3. Trykk på "Tid øke/reduere-knappen" som lar deg stille inn arbeidstiden fra 1-30 minutter.


4. Trykk på "Start"/"Pause" Suction Stick start operasjonen. Effektenerginivået er justerbart som gjør det mulig å stille inn fra nivå 1 til 10 med "Energikjøning/reduer-knapp"

5. Når du vil at sugepinnen skal slutte å virke under operasjonen, kan du trykke på "Pause"-knappen.

6. Trykk på "strømbryteren" for å slå av utstyret når behandlingen avsluttes, og "strømbryteren" vil vise rødt på dette tidspunktet. Rengjør sugepinnen og det mikrokrystallinske slipehodet med 75 % alkohol etter at du har tatt ut stopselet, og oppbevar det på et tørt sted.

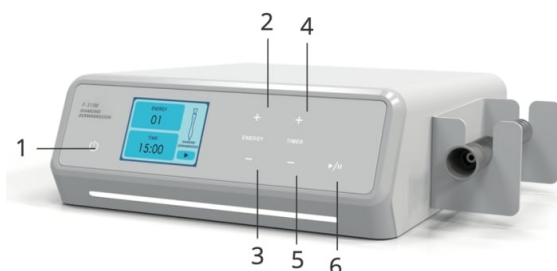

1. Av/på
2. Energi +
3. Energi -
4. Tid +
5. Tid -
6. Programvelger
7. Start/pause

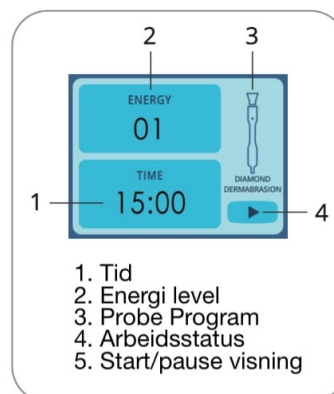

1. Tid
2. Energi level
3. Probe Program
4. Arbeitsstatus
5. Start/pause visning

### ADVARSEL under bruk:

Denne funksjonen er ikke aktuelt for pasienter med hypertensjon, hjertesykdom og diabetes., gravide, ammende kvinner, kvinner med menstruasjon bør ikke brukes. Maskinen skal ikke brukes på pasienter med smittsomme sykdommer og kreft, personer med arvev og kollagenmangel bør ikke bruke denne funksjonen, ellers det forårsaker permanent hudskade

Analysér brukerens hudtilstand før pleie, og velg deretter riktig slipehode og riktig sug.

Etter hver bruk må filteret ved sugepinnen rengjøres eller skiftes

Etter pleie, rengjør ansiktet med vann.

Etter behandling bør slipehodet desinfiseres med 75 % alkohol og oppbevares forsvarlig og tørt.

### Advarsler

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)

Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.

Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene



**Vedlikehold**

Husk å koble fra strømmen før vedlikeholdet starter. NB! Apparatet må ikke skrues opp eller demonteres på noen måte for vedlikehold. Tork av alle overflater på maskinen med en tørr klut. Diamanthoder kan vaskes med egnet middel, og desinfiseres.

**Resirkulering**

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

**Dette produktet oppfyller følgende krav**

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC

**Importør**

Silverlines AS, [www.silverlines.no](http://www.silverlines.no), +47 77 13 55